

## Kurze Anleitung zum „Maul-Abstrich“

### 1. Die Abfolge:

1. Pro Hund werden **zwei** Abstriche genommen (A und B Probe)
2. Kleben Sie die beigefügten Etiketten auf die entsprechenden Probenröhrchen
3. Öffnen Sie die Abstrich-Verpackung vorsichtig am roten Plastik – Ende und nehmen Sie damit den Holzstab aus der Schutzhülle
4. Bitte Watte **nicht** mit den Fingern berühren oder Hunde daran schnuppern/lecken lassen, bzw. auf den Boden werfen (=Kontamination)
5. Halten Sie das rote Stab-Ende fest in der Hand. Fahren Sie nun **kräftig/beherzt und etwas rubbelnd**, an der **Haut der Lefzen-Innenseite** hin und her (**ca. 20 Sekunden**) siehe Abb.: 2 unten.
6. Lassen Sie den fertigen Abstrich wenige Sekunden antrocknen.
7. Packen Sie den Abstrich wieder in die schützende Plastikhülle.
8. Wiederholen Sie diese Schritte mit dem zweiten Abstrich-Set (B-Probe).
9. Fertig!

### 2. Das Abstrichmaterial:



**Abb.: 1** Ein Abstrich-Set besteht aus Plastik-Schutzhülle und sterilem Wattetupfer mit rotem Haltegriff

### 3. Probennahme:

Bitte ca. 20 Sekunden an der Maul-Schleimhaut der Lefzen mit dem Wattebausch hin und her sowie kreisrund kräftig rubbeln.



**Abb.: 2** Hundemaul bei der Probennahme mit Watteabstrich in der Lefze